

POLAR EQUINE-BÄLTE

Användarhandbok

Kompatibel med



Tillverkad av

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

SWE 12/2018

Välkommen

Tack för att du valde Polar! I den här handboken går vi igenom användningen och skötsel av ditt Polar Equine-bälte.

Polar Equine-bältets delar


PULSSENSOR

Pulssensorn mäter din hästs puls i realtid och skickar informationen kontinuerligt och trådlöst till din Polar träningsenhet eller mobilapp. Den är kompatibel med Bluetooth® smart ready-enheter som stöder pulsmätning. Se pulssensorns kom igång-guide (ingår i paketet) för anvisningar.




EQUINE-BÄLTE


Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att den åker ur bältet.

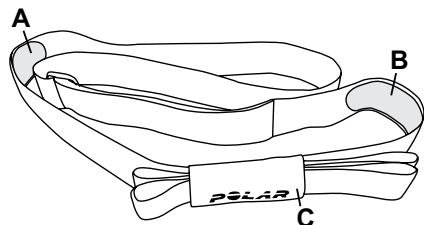

BAND

Använd banden för att fästa equine-bältet på sadelgjorden eller seldonet.

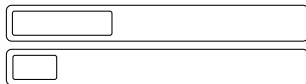

 Du kan ladda ner denna guide på tyska, franska, italienska, spanska, finska och svenska på support.polar.com. Se gärna videohandledningarna på support.polar.com för mer information.

Skötsel och underhåll

Följande instruktioner hjälper dig att uppfylla garantivillkoren, hålla enheten i toppskick, säkerställa tillförlitlig mätning och maximera bältets och pulssensorns livslängd.

PULSSENSOR

Lossa pulssensorn från fickan efter varje användning och torka den med en mjuk handduk. Rengör pulssensorn med en mild tvållösning när det behövs. Använd aldrig alkohol eller slipande material (t.ex. stålull eller rengöringskemikalier).

BÄLTE

Skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning och häng upp för att torka. Rengör bältet varsamt med en mild tvållösning när det behövs. Använd inte en fuktighetsbevarande tvål, då den kan lämna kvar rester på bältet. Bältet får inte blötläggas, strykas, kemtvättas eller blekas. Dra inte i bältet och böj inte elektrodytorna kraftigt. Se etiketten på bältet för detaljerade tvättninstruktioner.

FÖRVARING

Torka och förvara bältet och pulssensorn separat för att maximera livslängden på pulssensorns batteri. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av spännet ska pulssensorn inte förvaras i tättslutande material som inte andas. Utsätt inte pulssensorn för direkt sol under längre perioder.

SERVICE

Under den tolv månader långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Servicecenter utför service (utöver byte av batteri). Garantin täcker inte skador eller följskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. För kontaktinformation och alla adresser till Polar Servicecenter, besök www.support.polar.com och landsspecifika webbplatser.

Begränsad internationell Polar-garanti för Equine-produkter

- Polar Equine-produkter är utvecklade och tillverkade för användning i hästsporter. Alla produkter går igenom rigorösa tester innan de lämnar fabriken.
- Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter under tillämpliga gällande nationella lagar eller delstatslagar, eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren, med avseende på försäljningsavtalet.
- Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Inc. till kunder som har köpt sin produkt i USA eller Kanada. Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Oy till kunder som har köpt denna produkt i andra länder.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterar den ursprungliga innehavaren av denna produkt att produkten är fri från defekter när det gäller material eller utförande i tolv (12) år från inköpsdatumet.
- **Det ursprungliga inköpskvittot är ditt inköpsbevis!**
- Garantin täcker inte slitdelar som batterier och Equine-bältet, normalt slitage av produkten, skador p.g.a. felaktig användning, missbruk, olyckor eller icke efterlevnad av försiktighetsåtgärderna, felaktigt underhåll, spruckna, trasiga eller repade glas/displayer, modifierade eller ändrade produkter eller deras delar.
- Garantin täcker inte några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta eller indirekta, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till produkten.
- Artiklar som har köpts i andra hand omfattas inte av garantin, såvida inget annat anges i den lokala lagen.
- Under garantiperioden repareras eller ersätts produkten på något auktoriserat Polar Service Center, oavsett i vilket land produkten köptes.

Garantin med avseende på alla produkter begränsas till de länder där produkten ursprungligen marknadsfördes.

Fäst bältet

1. För att pulssensorn ska kunna mäta pulsen korrekt ska du kontrollera att elektrodytorna i plast ligger dikt an mot hästens hud. Fukta bältet ordentligt, till exempel i en hink med vatten (1).
2. Fukta även hästens hår vid de ytor där elektroderna på bältet placeras (2). Om din häst har långt eller tjockt hår kan du klippa de här områdena. Det förbättrar betydligt pulssignalens kvalitet.
3. Fäst pulssensorn på fickan (3). Stäng fickan ordentligt.
4. Placera bältet på pulssensorfickans baksida, som visas på bilden (4).
5. Placera bältet såsom visas (5), med pulssensorfickan på hästens vänstra sida. Detta säkerställer att elektrodytorna på bältet är i rätt position. Se till att elektrodytorna är på hästens vänstra sida.
6. Sadla/spänn för hästen. Pulssensorn ska ligga under sadelgjorden/seldonet. Fäst pulssensorn på sadelgjorden/seldonet med bandet såsom visas på bilden (6A, 6B, 6C).
7. Fäst bältet på sadelgjorden eller seldonet på hästens högra sida med hjälp av det andra bandet (7). Bältet ska ligga under sadelgjorden/seldonet.

Pulssensorns område är över 10 m. Du kan därför övervaka hästens puls även vid longering.

i För att optimera kontakten mellan hästens hud och elektroderna, kan kontaktgel användas på elektroderna. Det säkerställer en bättre detektion av hästens puls. Applicera gelen på elektrodytorna på bältets baksida.

