


POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Guía de comienzo rápido

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. COMPONENTES DEL PRODUCTO

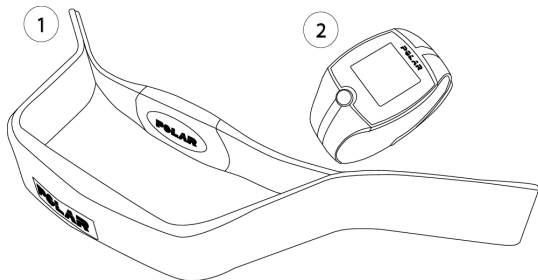



1. **Transmisor T31 con asa:** el transmisor envía al training computer la señal de frecuencia cardíaca con exactitud de ECG.
2. **Training computer FT1:** el training computer muestra la frecuencia cardíaca.



El Manual del usuario en alemán, francés, italiano, español, finés y sueco puede descargarse de www.polar.com/support.

Para ver tutoriales en vídeo, visita http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

2. USO DEL FT1 HEALTHCHECK

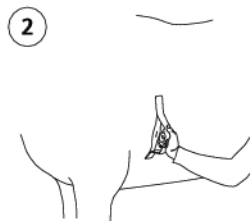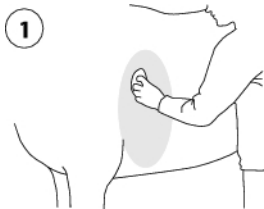

1. Humedece el pelo del caballo abundantemente como se indica (1). También puedes usar gel para electrodos.
2. Apoya el transmisor sobre el pelo del caballo (2). Mantén el training computer FT1 a una distancia máxima de 1 metro / 3 pies del transmisor.
3. Pulsa el botón para empezar. La frecuencia cardíaca del caballo se indica en 5 segundos.
4. Pulsa el botón para pararla.

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lecturas de frecuencia cardíaca anormales

- Asegúrate de que el transmisor esté bien colocado sobre la piel del caballo.
- Asegúrate de que el pelo del caballo esté bien humedecido debajo del transmisor.
- La acumulación de sudor y suciedad puede interferir en la medición de la señal del corazón con el transmisor. Comprueba si el transmisor requiere limpieza.
- Si la medición de frecuencia cardíaca sigue sin funcionar, es posible que la pila del transmisor o del training computer esté descargada. Solicita la comprobación de la pila a personal de servicio autorizado de Polar. Contacta con tu punto de venta o distribuidor para obtener más detalles.



Para ver un tutorial en vídeo acerca del uso del FT1 Healthcheck, visita http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

4. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cuidado y mantenimiento

Sigue las instrucciones de cuidados para asegurar una medición fiable y maximizar la vida útil del transmisor y del training computer. Las siguientes instrucciones te ayudarán a cumplir los requisitos de la garantía.

Conserva el transmisor y el training computer en un lugar fresco y seco. No guardes los dispositivos en un ambiente húmedo, en materiales no transpirables (una bolsa de plástico o una bolsa de deporte) ni con materiales conductores (una toalla húmeda). No expongas los dispositivos a la luz solar directa durante períodos prolongados de tiempo. Limpia los dispositivos con una solución de jabón suave y agua y sécalos con una toalla. No utilices nunca alcohol ni otros

materiales abrasivos (estropajos de acero o productos químicos de limpieza). No dobles ni estires el transmisor. Si lo hicieras, podrías dañar los electrodos. No pulses el botón de tu training computer bajo agua corriente.

Servicio técnico

Durante los 12 meses del periodo de garantía, aconsejamos que sólo solicites el servicio técnico a un punto de servicio técnico autorizado de Polar. La garantía no cubre los daños directos o resultantes causados por un servicio técnico no autorizado por Polar Electro. Para obtener información de contacto y todas las direcciones de los centros de servicio técnico Polar, visita www.polar.fi/support y las páginas web específicas de tu país.

Garantía

Garantía internacional limitada de Polar para productos Equine

- Los productos Polar Equine son desarrollados y fabricados para su uso en los deportes hípicos. Cada producto es sometido a ensayos rigurosos antes de salir de la fábrica.
- Esta garantía no afecta a los derechos legales del cliente en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable, ni a los derechos del cliente frente al vendedor contraídos a partir del contrato de compraventa.
- Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Inc. para los clientes que han adquirido este producto en EE.UU. o Canadá. Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Oy para los clientes que han adquirido este producto en otros países.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantiza al cliente/comprador original de este dispositivo que el producto estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante doce (12) meses a partir de la fecha de compra.
- Conserva el recibo o la factura original como prueba de la compra.
- La garantía no cubre la pila, el desgaste normal, daños debidos a un uso indebido, mal uso, accidentes o el incumplimiento de las precauciones; mantenimiento inadecuado; estuches/pantallas rajados, rotos o con arañazos; productos (o sus piezas) modificados o alterados ni la cinta de electrodos ni la correa de los sensores.
- La garantía no cubre ningún daño, pérdida, costes ni gastos, ya sean directos, indirectos o accidentales, resultantes o especiales, surgidos o relacionados con el producto.

- Los artículos adquiridos de segunda mano no están cubiertos por la garantía a no ser que se estipule lo contrario en la legislación local.
- Durante el periodo de garantía, el producto será reparado o reemplazado por cualquiera de los puntos de servicio técnico autorizados de Polar, independientemente del país de adquisición.

La garantía relativa a cualquier producto estará limitada a los países en los que se haya vendido inicialmente el producto.

La información regulatoria está disponible en www.polar.com/support.



Esta marca indica que el producto está protegido contra descargas eléctricas.



Esta marca de contenedor con ruedas tachado indica que los productos Polar son dispositivos electrónicos y están dentro del ámbito de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo acerca de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y que las baterías y acumuladores utilizados en los productos están dentro del ámbito de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de septiembre de 2006 relativo a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. Es por ello que estos productos y las pilas y los acumuladores contenidos en los productos Polar se deben eliminar por separado en los países de la UE.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy,
FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy es una compañía con
certificación ISO 9001:2008.

Todos los derechos reservados. Queda
prohibida la reproducción de este manual
en forma alguna o por cualquier medio
sin la autorización previa y por escrito de
Polar Electro Oy. Los nombres y logotipos
con el símbolo ® que aparecen en este
Manual del usuario o en el paquete de
este producto son marcas registradas de
Polar Electro Oy.

Limitación de responsabilidades

Recuerda que estos términos de garantía
se aplicarán a los productos Polar Equine
en sustitución de cualesquiera otros
términos de garantía de Polar Electro,
incluso si dichos otros términos
aparecieran en alguna parte de la
documentación del producto.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR®

LISTENS TO YOUR BODY