


# POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Démarrage rapide

**POLAR**<sup>®</sup>  
LISTENS TO YOUR BODY

# 1. COMPOSANTS DU PRODUIT


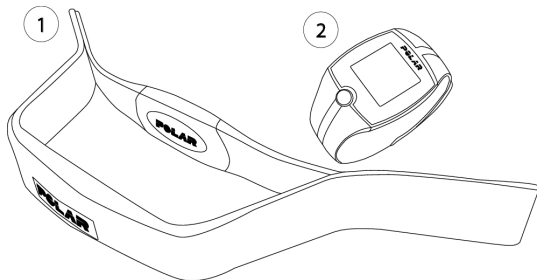


1. **Émetteur T31 avec guidon** : l'émetteur envoie le signal de fréquence cardiaque (ECG) précis au cardiofréquencemètre.
2. **Cardiofréquencemètre FT1** : le cardio affiche la fréquence cardiaque.



*Le manuel d'utilisation en allemand, français, italien, espagnol, finnois et suédois est disponible en téléchargement sur [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support).  
Des didacticiels vidéo sont disponibles sur [http://www.polar.com/en/polar\\_community/videos](http://www.polar.com/en/polar_community/videos).*

## 2. UTILISER LE FT1 HEALTHCHECK

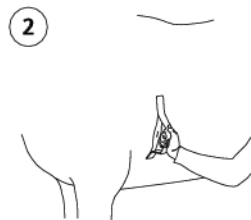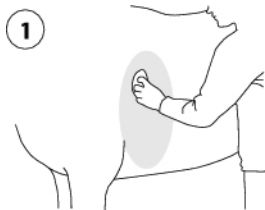

1. Mouillez abondamment le crin du cheval comme indiqué (1). Vous pouvez aussi utiliser du gel pour électrodes.
2. Placez l'émetteur contre le crin du cheval (2). Maintenez le cardiofréquencemètre FT1 à 1 mètre de l'émetteur.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer. La fréquence cardiaque de votre cheval apparaît dans les 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton pour arrêter.

# 3. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

## Relevés de fréquence cardiaque anormaux

- Vérifiez que l'émetteur est bien plaqué contre le cheval.
- Veillez à bien humidifier le crin du cheval sous l'émetteur.
- L'accumulation de sueur et de saleté peut gêner la mesure du signal émis par le cœur vers l'émetteur. Vérifiez si l'émetteur a besoin d'être nettoyé.
- Si la mesure de la fréquence cardiaque ne fonctionne toujours pas, la pile de l'émetteur ou du cardio est peut-être vide. Demandez à un Centre de service après-vente agréé Polar de vérifier la pile. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur/revendeur.



*Un didacticiel vidéo concernant l'utilisation du FT1 Healthcheck est disponible sur [http://www.polar.com/en/polar\\_community/videos](http://www.polar.com/en/polar_community/videos).*

## 4. INFORMATIONS IMPORTANTES

### **Entretien et maintenance**

Suivez les instructions d'entretien afin de garantir des mesures fiables et d'optimiser la durée de vie de l'émetteur et du cardiofréquencemètre. Les instructions suivantes vous aideront à vous acquitter des engagements au titre de la garantie.

Rangez votre cardio et votre émetteur dans un endroit sec et frais. Ne les rangez ni dans un endroit humide, ni dans un matériau imperméable à l'air (comme un sac plastique ou un sac de sport), ni à proximité d'un produit conducteur (comme une serviette humide). Ne les exposez pas aux rayons du soleil pendant une période prolongée. Nettoyez-les avec une solution d'eau et de savon doux, et séchez-les avec un chiffon. N'utilisez jamais d'alcool, de

matériaux abrasifs tels que de la paille de fer ou des détergents chimiques. N'étirez pas et ne courbez pas l'émetteur, sous peine d'endommager les électrodes. N'appuyez sur aucun bouton du cardio sous l'eau.

### **Service après-vente**

Pendant les 12 mois de garantie, nous vous recommandons de vous adresser à un Centre de service après-vente agréé Polar pour toute réparation éventuelle. La garantie ne couvre pas les dommages directs ou consécutifs causés par un service après-vente non agréé par Polar Electro. Pour obtenir les coordonnées et l'adresse de tous les Centres de service après-vente agréés Polar, visitez la page [www.polar.fi/support](http://www.polar.fi/support) et le site Web propre à chaque pays.

## **Garantie**

### **Garantie internationale Polar pour les produits Equine**

- Les produits Polar Equine sont conçus et fabriqués pour les sports équestres. Chaque produit est soumis à des tests rigoureux avant de quitter l'usine.
- Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales ou fédérales en vigueur, ni les droits des consommateurs à l'encontre du revendeur concernant les litiges liés aux contrats d'achat et de vente.
- La présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Inc. pour les clients ayant fait l'acquisition de ce produit aux États-Unis ou au Canada. La présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Oy pour les clients ayant fait l'acquisition de ce produit dans d'autres pays.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantissent à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défauts liés aux matières premières ou à la fabrication, et ce, pendant un délai de douze (12) mois à partir de la date d'achat.
- Le reçu de l'achat initial constitue votre preuve d'achat !
- La garantie ne couvre pas la pile, l'usure normale, les dégâts liés à une mauvaise utilisation, à une utilisation abusive, aux accidents ou au non-respect des précautions d'emploi, à un mauvais entretien, les boîtiers/écrans cassés ou rayés, les produits ou pièces modifiés ou transformés, la ceinture à électrodes et la sangle pour émetteurs.
- La garantie ne couvre pas les dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés par ou liés au produit.
- Les produits achetés d'occasion ne sont pas couverts par la garantie, sauf

stipulation contraire de la législation locale.

- Pendant la période de garantie, l'appareil est soit réparé, soit remplacé par un Centre de service après-vente agréé Polar, quel que soit le pays d'achat.

La garantie couvrant tout produit est limitée aux pays dans lesquels ce produit est commercialisé.

Informations réglementaires disponibles à l'adresse [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support).



Ce marquage indique que le produit est protégé contre les chocs électriques.



Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les produits Polar sont des instruments électroniques, soumis à la directive 2002/96/CE de l'Union européenne et du Conseil sur le tri sélectif des déchets électriques et électroniques (WEEE) ; les piles et les accumulateurs utilisés dans ces produits entrent dans le cadre de la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 de l'Union européenne et du Conseil relative aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et d'accumulateurs. Ces produits et ces piles/accumulateurs contenus dans les produits Polar doivent donc être éliminés séparément dans les pays de l'Union européenne.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy,  
FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy est une entreprise  
certifiée ISO 9001:2008.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce  
manuel ne peut être utilisée ou  
reproduite sous quelque forme ou par  
quelque moyen que ce soit sans  
l'autorisation écrite préalable de Polar  
Electro Oy. Les noms et logos  
accompagnés du symbole ® dans ce  
manuel d'utilisation ou sur l'emballage de  
ce produit sont des marques  
commerciales de Polar Electro Oy.

### **Décharge de responsabilité**

Veillez noter que les présentes  
conditions de garantie s'appliquent aux  
produits Polar Equine au lieu de toute  
autre garantie Polar Electro, même si  
d'autres conditions peuvent figurer dans  
certaines documentations produit.



Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

[www.polar.fi](http://www.polar.fi)

**POLAR**<sup>®</sup>  
LISTENS TO YOUR BODY